

# GEBRUIKSAANWIJZING



steve  
your support




*Dat is pas comfort!*

HÉT EERSTE EN ENIGE HULPMIDDEL VOOR HET AAN-ÉN UITTREKKEN VAN ALLE SOORTEN COMPRESSIEKOUSSEN.


## AANTREKKEN




**1** Plaats Steve voor u op een salontafel en ga achter Steve staan. Positioneer de kous met de hiel naar u toe boven Steve

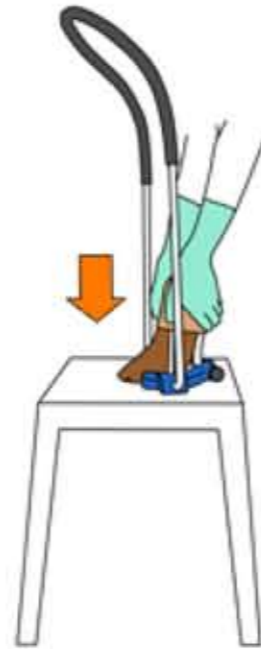

**2** Zoom de kous om het instapstuk van Steve. Stroop de kous op tot het hakstuk van de kous minimaal bovenaan zit.  
*\*let op: Het exacte punt verschilt per gebruiker.*

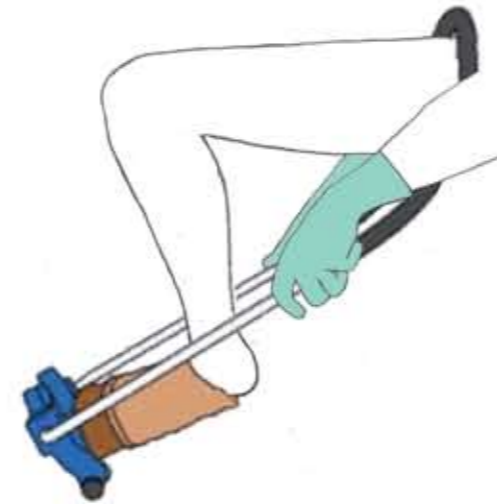

**3** Neem plaats op een stoel. Leg het handvat tegen de knie OF in de lies (als u uw voet niet kunt strekken). Steek vervolgens uw voet volledig in de kous.

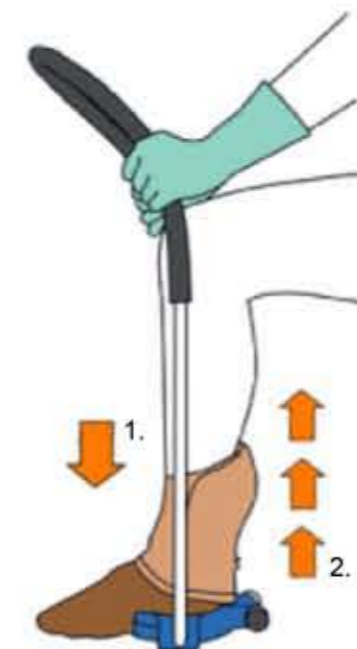

**4** Rol Steve naar u toe zodat deze plat op de grond staat onder uw knie. Duw vervolgens uw voet plat op de grond(1.). Als laatste trekt u Steve rustig omhoog met op en neer gaande bewegingen(2.).  
*\*let op: Rek de kous niet te ver uit.*



**5** Zet Steve terzijde en wrijf de kous op de juiste plek.

## UITTREKKEN



Indien u kousen tot de lies draagt, stroop deze af tot onder de knie.

**1** Schuif de ring met de opening van u af en pijl naar boven gericht, tussen de kous en uw been




**2** Schuif de ring naar beneden tot onder de kuit. Zorg dat de ring niet scheef zit.



**3** Zet Steve recht op de ring en druk deze naar beneden.



**4** Zodra de wieljes de grond raken kunt u Steve van u af rijden.

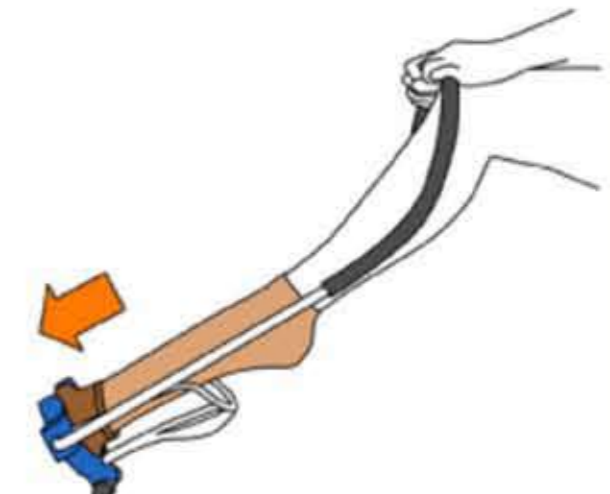

**5** Duw Steve verder van u af en trek uw been uit de kous.



Leverbaar in 2 maten:

### Steve® Blue

geschikt voor kousmaat:

(S) (M)

(I) (II) (III)

(4) (6) (8)

kuitomvang cC:

30-38 cm

### Steve® Orange

geschikt voor kousmaat:

(L) (XL)

(IV) (V) (VI)

(10) (12) (14)

kuitomvang cC:

38-46 cm



Top Naeffdreef 21  
5044 LK Tilburg

0900 2468 357  
info@steunkousgemak.nl

